


Инструкция

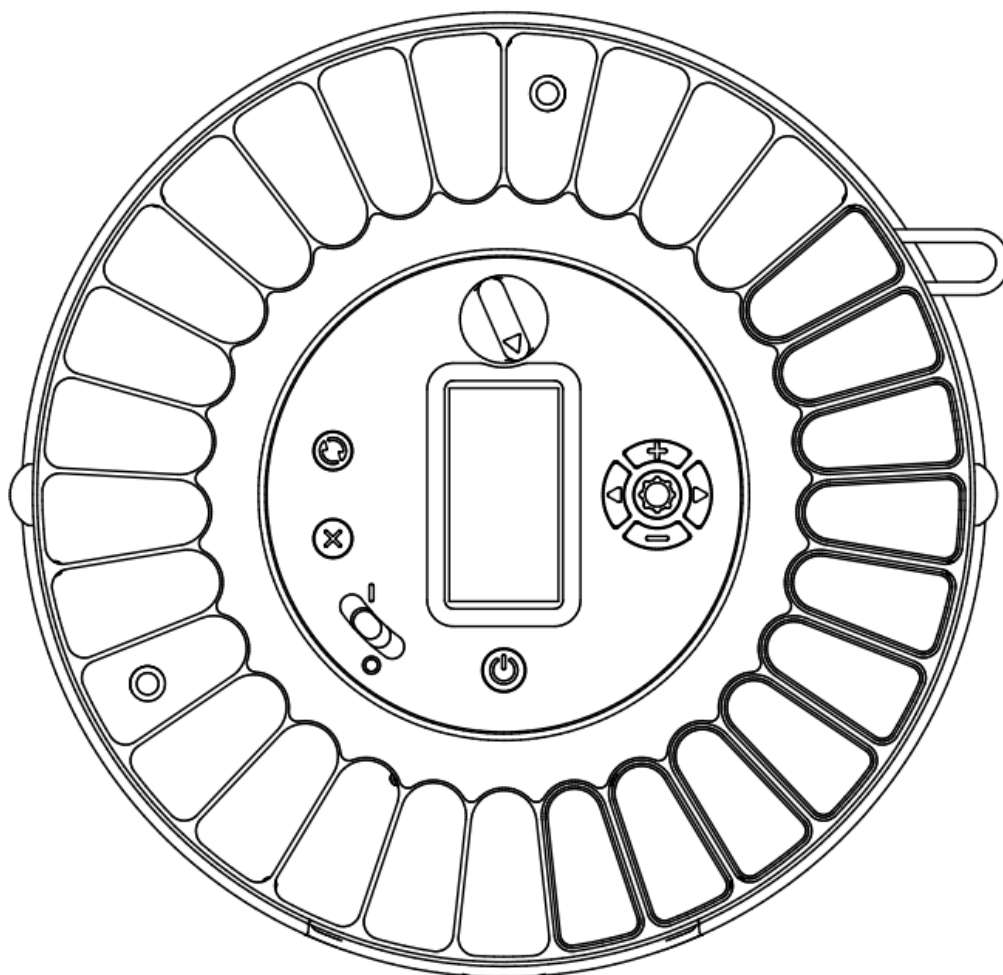

Умная таблетница с автовыдачей стаканчика прибор, который не просто сигнализирует, а физически выдвигает стаканчик в заданное время по таймеру. Идеально для пожилых людей, деток, спортсменов, принимающих много витаминов и БАД, и тех, кто забывает принимать или путает таблетки.

✓ Как только стаканчик выпал, она издает звук и светится, пока стаканчик с таблетками не снимут. Сигнализацию можно настраивать: короткая, с повтором, или непрерывная - пока не заберут стаканчик). В итоге:

✓ Выезжает ТОЛЬКО один стаканчик в нужное время.

✓ НЕ ПРОПУСКАЮТСЯ приемы лекарств: Громкий сигнал и мигание нельзя проигнорировать.

✓ НЕ ПЕРЕПУТАЮТСЯ таблетки из разных ячеек.

🔒 Имеет надежную защиту:

✓ Крышка может быть закрыта маленьким навесным замком.

Это блокирует доступ к ячейкам с таблетками (можно взять только тот стаканчик, который выпадает вниз по таймеру), и защищает настройки самой таблетницы от изменения (можно смотреть только график и остаток ячеек).

✓ Устойчивость и безопасность.

В корпусе есть специальные отверстия для крепления к столу или тумбочке. Вы будете спокойны, что активные бабушки и дедушки или детки не уронят и не переставят прибор, не собьют настройки.

✓ Повышает эффективность лечения

✓ Таблетница имеет информативный дисплей и достаточно кнопок для удобной настройки устройства.

Элементы управления

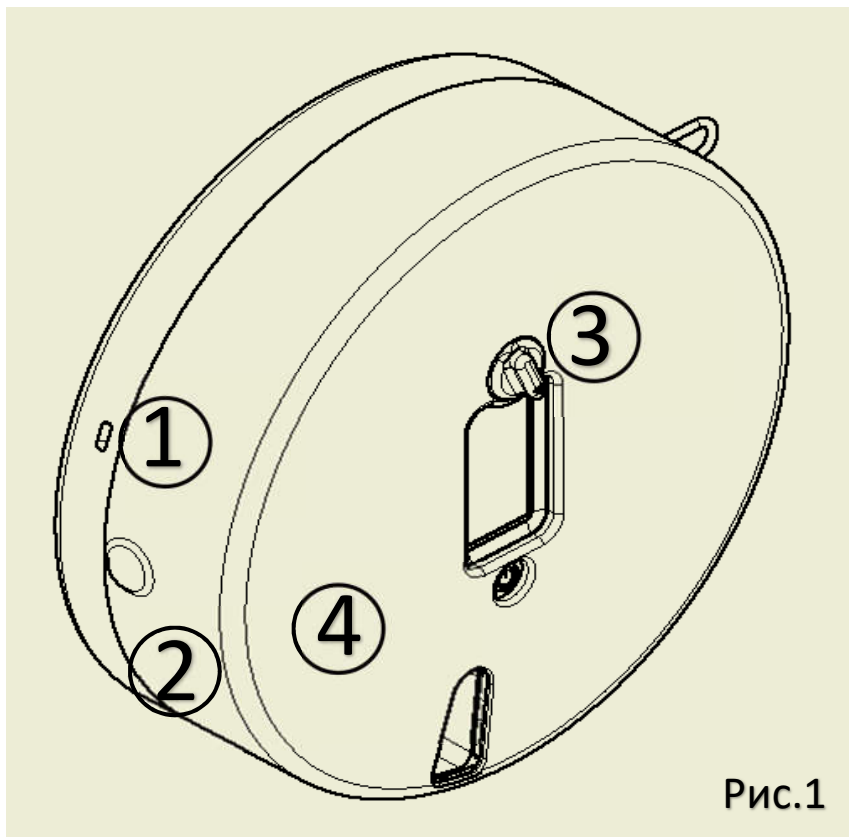


Рис.1

1. Порт зарядки

*Подходит любая зарядка TYPE-C.
Приблизительное время полной зарядки 4 часа.*

2. Выступы фиксаторов крышки

3. Ручка замка

4. Крышка

Для снятия крышки убедитесь, что стрелка ручки замка смотрит вверх. Далее взявшись за выступ 2 указательными пальцами обеих рук упритесь большими пальцами в ручку 3 и потяните крышку на себя.

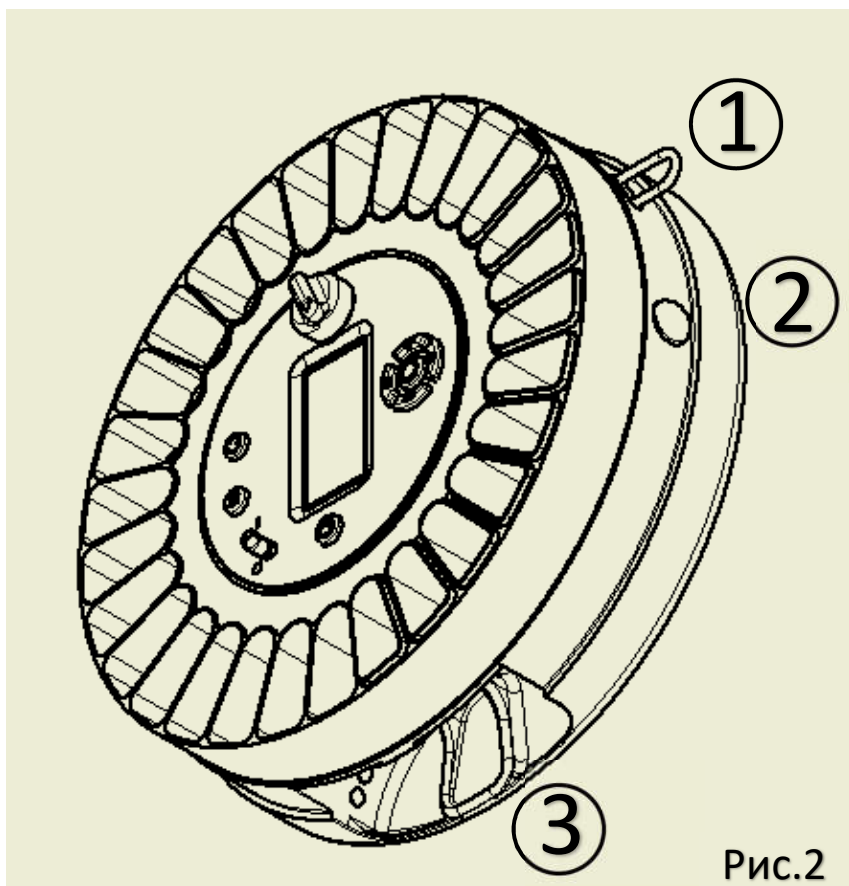


Рис.2

1. Петля замка


Для выдвижения петли необходимо повернуть ручку А против часовой стрелки в положение "Замок"

2. Фиксаторы крышки

Служат для удерживания крышки в закрытом положении

3. Отсек для ГОТОВЫХ порций

Место куда выпадают стаканчики по графику. Пожалуйста следите, чтобы здесь не было посторонних предметов (рассыпавшихся таблеток, монет, мусора и пр.)

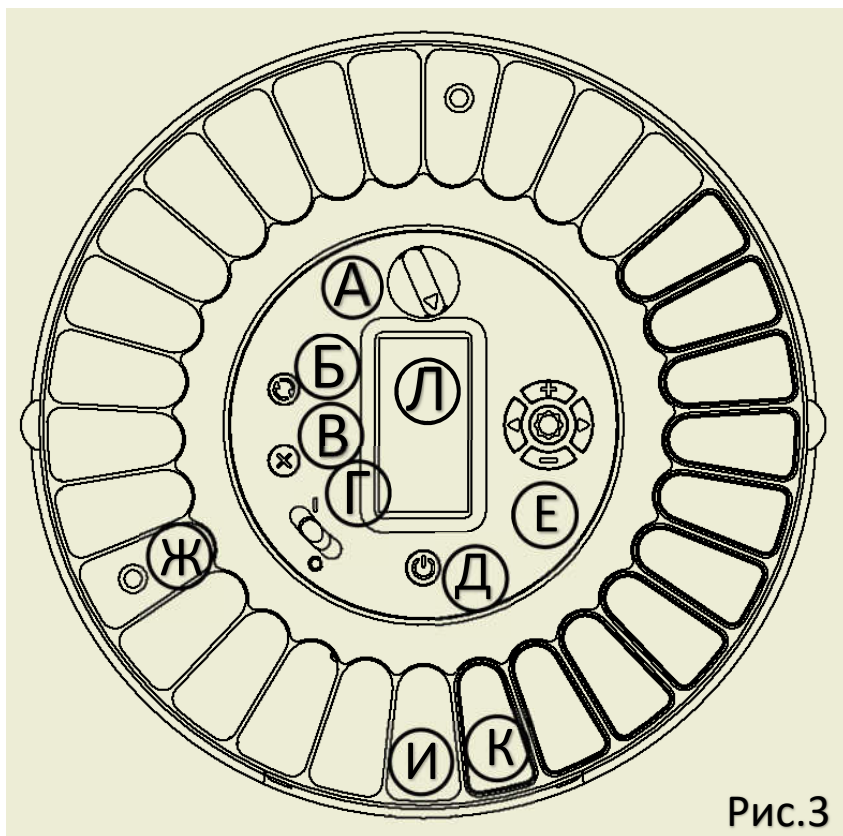

А. Ручка замка
Б. Кнопка теста выдачи
В. Кнопка сброса
Г. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
Д. Кнопка выхода из сна
Е. Блок кнопок
Ж. Отверстие под винты
И. Отверстие для готовых стаканчиков
К. Установленный стаканчик
Л. Дисплей

Рис.3

А. Ручка замка

Стрелка в верх – открыто

Стрелка отклонена вправо – закрыто

Стрелка вниз – закрыто на замок

Б. Тест

Кнопка теста выдачи. При нажатии устройство имитирует одну выдачу, как будто выдача по графику, для проверки работы и настроек сигнализации. (Не работает из меню настроек)

В. Кнопка сброса

Кнопка сброса счетчика таблеток. На мониторе есть счетчик оставшихся дней и количества стаканчиков, которые заряжены в барабан. При наполнении барабана необходимо нажать для сброса счетчика в начало. Внимание! Счетчик не влияет на график и работу устройства, эта опция только для удобства оценки дней и количества стаканчиков до заправки.

Г. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ

Ползунок включения. Когда включен устройство работает всегда, даже когда дисплей автоматически выключается для энергосбережения, при отключенном дисплее моргает оранжевый индикатор на лицевой панели.

Для отключения устройство и соответственно выдач стаканчиков необходимо переместить ползунок вниз в положении выключено.

Д. Кнопка вывода устройства из режима сна

Эта единственная кнопка которую можно нажать когда крышка закрыта. Можно использовать, чтобы быстро проверить время, остаток стаканчиков и настройку графика. Изменение настроек невозможно, через эту кнопку.

Е. Блок кнопок

Центральная кнопка используется для перехода в режим настроек и обратно. При выходе из настроек все произведенные изменения автоматически сохраняются в памяти, даже если устройство будет отключено.

Кнопки + и – используются для изменения значений

Кнопки < и > – используются для перемещения курсора настройки

Ж. Отверстие под винты

Отверстия под винты (3 шт.) предназначены для фиксации устройства на поверхности, тем самым предотвращая перемещение устройства (дополнительная защита от потери при необходимости). Пожалуйста, избегайте чрезмерного усилия закручивания!

И. Отверстие для готовых стаканчиков

Сквозное отверстие предназначено для сообщения барабана с отсеком для готовых порций. Не предназначено для установки в него стаканчиков!

К. Установленный стаканчик

Стаканчики устанавливаются в слоты барабана в количестве 28 штук. Барабан вращается по часовой стрелке, очередность счёта стаканов начинается справа от центрального сквозного отверстия, против часовой стрелки (на рис.3 подписан буквой “К” первый в очереди на выдачу стакан).


Л. Дисплей

Служит для вывода информации. Внимание, устройство автоматически переходит в сон спустя две минуты с момента последнего нажатие любой кнопки. Для пробуждения необходимо нажать любую кнопку или устройство автоматически проснется по графику.

Индикаторы.


Не указаны на рисунке. Располагаются на лицевой панели сверху слева и справа. Слева индикатор заряда. Синий – Зарядка. Красный – Батарея разряжена. Зеленый – Батарея заряжена

Главный экран

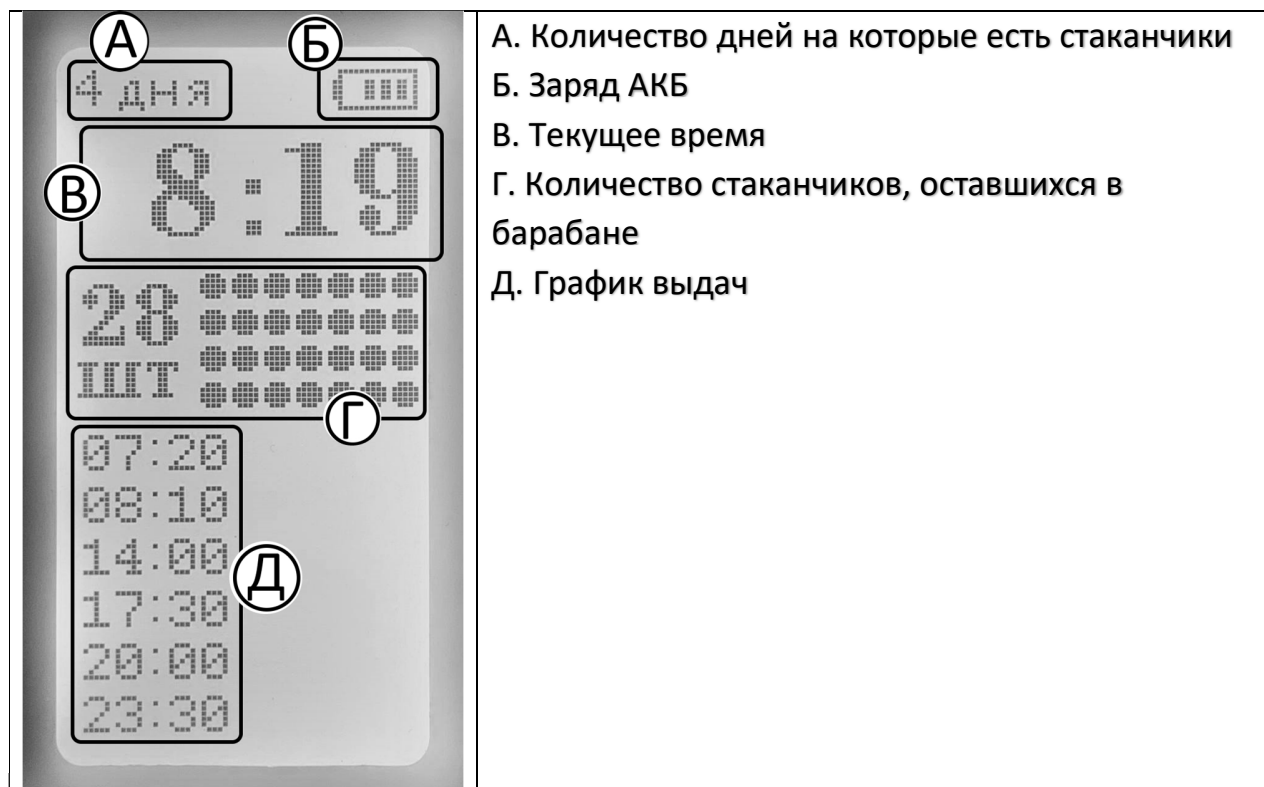












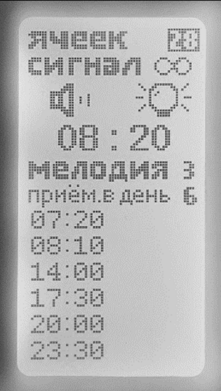



- А. Количество дней на которые есть стаканчики
- Б. Заряд АКБ
- В. Текущее время
- Г. Количество стаканчиков, оставшихся в барабане
- Д. График выдач







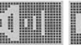

Настройка



Для настройки используйте блок кнопок Е. Для входа в режим настройки сделайте одно короткое нажатие на центральную кнопку с символом , повторное нажатие вернет Вас на главный экран. При выходе из настроек все произведенные изменения автоматически сохраняются в памяти, даже если устройство будет потом отключено.

Кнопки + и – используются для изменения значений.

Кнопки < и > – используются для перемещения курсора настройки.

	<p>Изменение количества ячеек используемых для подсчета дней и остатка стаканчиков в барабане. Введенное значение является стартовым после наполнение барабана. К примеру, если Вы хотите заряжать за раз 15 стаканчиков – введите значение 15 и после того как вы будете перезаряжать таблетницу, нажимайте кнопку «В» сброс на главном экране, для корректной работы счетчика. По умолчанию значение 28. Важно эта функция не влияет на график работы, даже если счетчик равен 0, устройство будет работать по графику. Эта функция служит только для удобства пользователя.</p>
	<p>Настройка стратегии работы сигнализации при выдаче стаканчика. Если стаканчик взят из отсека, то сигнал выключается через 1...2 сек. Если стаканчик не забирается, то возможны следующие варианты:</p> <p>   – сигнал работает 2, 5 или 10 минут и выключается. Повторное включение, только когда подойдет время следующей выдачи.</p> <p>   – сигнал циклично повторяется, через 15, 30 или 60 минут, продолжительность сигнала 5 минут.</p> <p> – сигнал работает бесконечно, пока устройство не разрядится или стаканчик не будет взят.</p>
	<p>Настройка громкости.</p> <p> – звуковой сигнал выключен.</p> <p>    – звуковой сигнал включен, уровни громкости.</p> <p>Во время настройки, можно оценить, как будет работать сигнализация.</p>

	<p>Настройка световой индикации.</p> <ul style="list-style-type: none">  – световая сигнализация выключена.  – световая сигнализация включена постоянно.  – световая сигнализация включена и мигает.  – световая сигнализация включена и плавно мигает. <p>Во время настройки, можно оценить, как будет работать сигнализация.</p>
	<p>Настройка текущего времени, часы.</p>
	<p>Настройка текущего времени, минуты.</p>
	<p>Выбор мелодии.</p> <p>Внимание! Выбранная мелодия будет играть, только если включен звук.</p>

	<p>Настройка количества приемов в сутки. Выберите от 1 до 12 приемов. Значение 0 означает отсутствие выдач.</p>
	<p>Настройка времени выдач аналогична настройке текущего времени. Перемещайте последовательно курсор и устанавливайте нужное время. Удерживая кнопки +/- можно быстро изменять значения. Если вам необходимо две выдачи за раз (допустим не вмещается в стаканчик), то устанавливайте одинаковое время. Если стаканчик не будет забран и подойдет время другой выдачи, то она будет пропущена.</p>

Дополнительные рекомендации

1. Если человек испытывает затруднение с возвращением стаканчиков назад в барабан, можно поставить рядом чашу. Можно также добавить надпись «стаканчик вернуть сюда» и поддерживать какое-то количество пустых стаканчиков для наглядности.
2. Можно иметь запас воды рядом с устройством, чтобы снизить вероятность отвлечься и забыть, пока человек пошёл за водой.
3. Если Вам не нужен прием в какое-то время или вы хотите выпить раньше или позже графика, то необязательно перенастраивать график. Можно изъять стаканчик из необходимого слота заранее. Устройство провернет барабан по графику, но если там нет стаканчика, то сигнала не последует, просто будет пропуск.